



**Сиденье
для ванны
Волна
Рифтон**

NEW

Сиденье для ванны Волна Рифтон

Система для купания и перемещения

Гигиена и здоровье идут вместе. Когда мы облегчаем принятие душа, укрепляется здоровье пациента. Вся новая Система для купания Волна была полностью и тщательно переработана, чтобы прием ванны и душа стал комфортнее, легче и безопаснее - как для пользователя, так и для осуществляющего за ним уход.

В ответ на запросы врачей и лиц, обеспечивающих уход, мы расширили новые сиденья для ванны для размещения крупных пользователей. А для лучшей защиты кожи мы добавили дополнительную набивку под мягкие плетеные ткани.

Помимо возможности установить сиденье на подставке для ванны или душа мы добавили остроумное устройство для перемещения в ванну (доступно для заказа летом 2017 года), чтобы полностью изменить способ трансфера и мытья крупных пользователей. Ничего подобного производители еще не предлагали.



Кресло для купания Волна прекрасно! Раньше поднимать ребенка в ванну было убийственно для спины, но новое устройство для перемещения полностью снимает эту опасность. Ролики для бокового движения в ванну - приятное дополнение, а возможность легко сложить сиденье и повесить на стену экономит много места.

*Линда К. Миллер,
физический терапевт
Нью-Йорк*

Отличительные особенности и преимущества

- **Очень широкое сиденье** с открытыми сторонами, 38 см ширина для малых и средних, 44 см для больших (легко вмещается во все обычные домашние ванны).
- **Большой размер** вмещает взрослых ростом до 188 см и весом до 113 кг.
- **Полностью совместимая;** все размеры сиденья совместимы с любым из 3 вариантов основания.
- **Опора для икр** независима от наклона спинки и сиденья.
- **Устройство перемещения в ванну** позволяет пользователям после размещения в кресле перемещаться вглубь ванны, а затем поворачиваться над ней для принятия душа.
- **Комплект-трансформер** позволяет пользователю экономично перейти от малого до среднего размера, просто покупкой новой спинки, сиденья и чехла.
- **Наименее затратная альтернатива** реконструкции ванной комнаты, проживанию в интернате или использованию водяной постели.

Преимущества и особенности

Не требует никаких инструментов

Кому нравится загромождать ванную комнату инструментом? Сиденью для ванны "Волна Рифтон" действительно не требуются инструменты как во время первоначальной сборки, так и во время пользования.



Щедро отмерянный

Широкое открытое сиденье комфортно в использовании людьми крупного телосложения, вмещается во все обычные домашние ванны.

Ширина сиденья большого размера - 44 см



Одной левой

Регулировка угла наклона спинки одной рукой позволяет осуществляющему уход держать другую руку на пользователе для обеспечения безопасности и уверенности.



Полная поддержка ног

Опора для икр, являясь опцией, обеспечивает полную поддержку. Регулируется независимо от остальной части сиденья нажатием на серые кнопки и вращением вверх или вниз. Опору для ног можно заказать только до покупки сиденья.





Подставка для ванны



Подставка для душа



Устройство для перемещения в ванну. Доступно летом 2017 года



Множество вариантов

Идеальное позиционирование пользователя достигается при помощи отдельной регулировки углов наклона спинки и сиденья, а также положения опоры для икр. Угол наклона сиденья меняется и от положения передних и задних ножек



Больше положений высоты

Для среднего положения сиденья выпрямите задние ножки, передние опустите вниз. Чтобы опустить кресло максимально низко в ванне, выпрямите задние и передние ножки. Полностью переведите сиденье в плоское положение для хранения.



Обязательные компоненты

Выберите размер и цвет сиденья



Выберите грудной ремень



Без латерального позиционирования

Простой грудной ремень безопасно удерживает пользователя в сиденье для ванны. Он снабжен лентой-липучкой, надежно застегивается сзади пряжкой в любом месте (по всей высоте) спинки.



С латеральным позиционированием

Грудной ремень с регулируемыми боковыми ремешками, которые дают дополнительную боковую поддержку, чтобы помочь пользователям поддерживать равновесие. Мягкие ремни совершенно не препятствуют трансферу.



Аксессуары



Головные блоки

Опция головные блоки обеспечивает боковую поддержку и позиционирование головы пользователя



Ремни для ног

Используйте легко регулируемые ремни для ног в качестве абдуктора для бедер (или просто для обеспечения дополнительной безопасности)



Опора для икр

Новая опора для икр обеспечивает большую поддержку нижней части ног. Она особенно необходима при использовании сиденья для ванны вместе с одной из подставок

Примечание: опора для икр заказывается в момент покупки и не может быть добавлена позже



Подставка для ванны

Поднимает сиденье для ванны на высоту 14 или 29 см путем изменения положения ножек подставки



Подставка для душа

Подставка для душа позволяет закатить пользователя в кресле в душевую кабинку на комфортной высоте, что улучшает качество мытья и бережет спину обслуживающего персонала. Снабжена 4-мя прочными, легко катящимися, фиксирующимися колесиками.



Аксессуары (продолжение)

Устройство для перемещения в ванну. **Доступно летом 2017 года**

Оборудование для купания людей с ограниченными возможностями, как правило, большое и громоздкое, занимает очень много места в ванной, которой пользуются все члены семьи. Часто это означает, что семьи вынуждены сокращать или экономить на гигиеническом уходе за своими близкими с особыми нуждами. И плохая гигиена часто приводит к ухудшению состояния здоровья. Теперь с новым оригинальным устройством вы можете легко выполнять перемещения в ванну - либо вручную, либо с помощью механического подъемника. После окончания принятия душа устройство для перемещения складывается и компактно висит на стене.




Уникальное движение в два этапа



Для перемещения нужно установить устройство максимально дальше от ванны. Затем закинуть устройство вглубь ванны и заблокировать колеса.



По мере того как верхняя часть кресла поворачивается на 90 °, оно одновременно перемещается примерно на 30 см вглубь ванны.

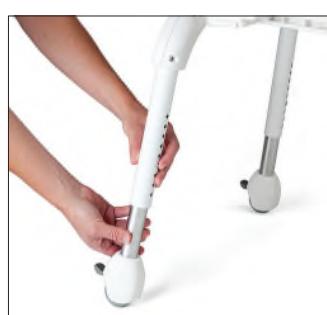

Устройство для перемещения в ванну подойдет для большинства ванн, высотой до 48 см.

Регулируемые по высоте ножки не допускают соприкосновения устройства с краем ванны.



1. Вместе с пользователем, надежно размещенным на сиденье, перекатите устройство для перемещения вглубь ванны, насколько это возможно и заблокируйте колеса




2. Нажмите один из серых фиксаторов, и начните вращать сиденье и клиента над ванной



3. Одновременно с вращением продолжайте передвигать пользователя вглубь ванны, аккуратно приподняв над ней его ноги



4. В конечном положении можно дополнительно отрегулировать сиденье перед принятием душа

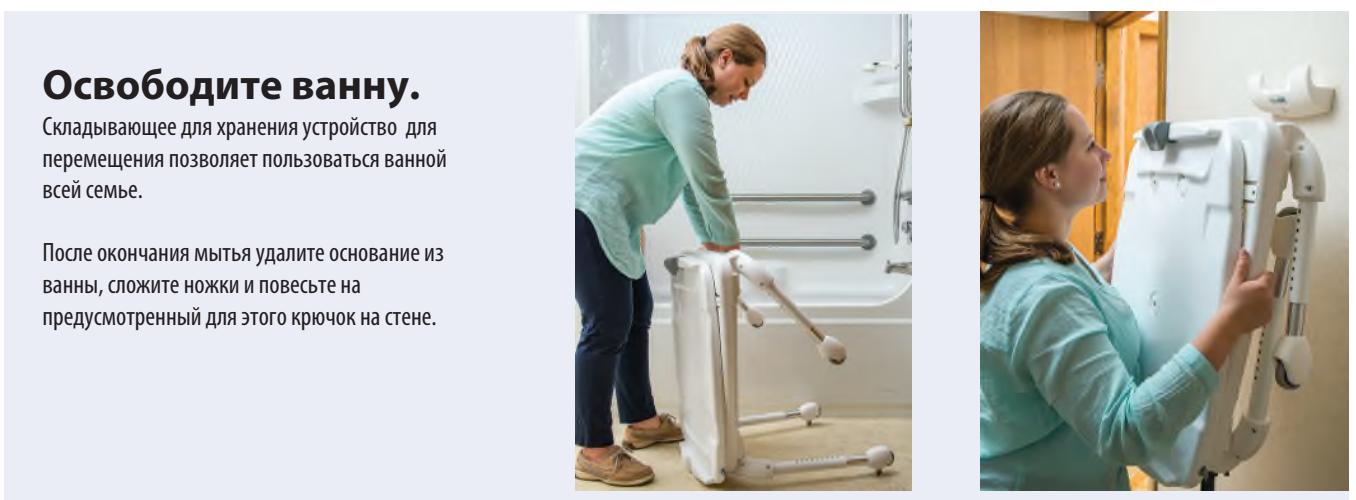

Размеры сиденья Волны

| Размеры (см) | Z210 мал | Z220 средний | Z230 большой |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| Рост | до 117 | 102–142 | 127 – 188 |
| Ключевой размер - рост. Выберите размер сиденья в соответствии с ростом пользователя. Важно: Убедитесь, что глубина и ширина сиденья, высота спинки являются адекватными. Вес пользователя не должен превышать максимальную рабочую нагрузку. | | | |
| Размеры (см) | | | |
| Глубина сиденья | 27 | 33 | 43 |
| Ширина сиденья | 38 | 38 | 44 |
| Высота спинки | 58 | 67 | 81 |
| Высота сиденья | 5 – 18 | 5 – 18 | 5 – 18 |
| Высота сиденья (с подставкой для ванны) | 32–47 | 32 – 47 | 32 – 47 |
| Высота сиденья (с подставкой для душа) | 70 | 70 | 70 |
| Высота сиденья (с устройством для перемещения) | 55–70 | 55 – 70 | 55 – 70 |
| Длина сетчатой области (в разложенном виде) | 89 | 104 | 128 |
| Длина сетчатой области (в разложенном виде) (с опорой для икр) | 108 | 124 | 155 |
| Ширина основания | 46 | 46 | 53 |
| Длина основания (в разложенном виде) | 75 | 75 | 75 |
| Высота подставки для ванны (ножки разложены) | 20 | 20 | 20 |
| Длина подставки для ванны (ножки разложены) | 99 | 99 | 99 |
| Ширина подставки для ванны (ножки разложены) | 44 | 44 | 44 |
| Высота подставки для душа | 56 | 56 | 56 |
| Длина подставки для душа | 69 | 69 | 69 |
| Ширина подставки для душа | 86 | 86 | 86 |
| Максимальная высота края ванны для устройства перемещения | 48 | 48 | 48 |
| Максимальная рабочая нагрузка | 34 | 68 | 113 |
| Регулировка угла наклона спинки и сиденья | 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° | | |



Без опоры для икр **С опорой для икр**

Комплект-трансформер является отличным решением для растущих детей. За небольшую доплату вы можете переделать сиденье малого размера в средний размер. Мы отправим вам новый больший чехол из ткани, раму спинки и сиденья, грудной ремень и инструкции о том, как удалить старые и установить новые детали на существующем кресле.



Чехол из ткани легко снимается для стирки..



Все три размера доступны в двух красивых цветах - синий и розовый.

Как заказать

1. **Измерьте** рост пользователя, чтобы определить размер сиденья (см. таблицу размеров)
2. **Выберите** цвет и размер сиденья и грудной ремень.
3. **Выберите** необходимые аксессуары.

Комплект-трансформер без инструментов преобразует ваше сиденье малого размера в средний размер

Чехол без опоры для икр

Синий Z268

Розовый Z269

(включает сиденье, спинку, чехол и грудной ремень)

Чехол с опорой для икр

Синий Z266

Розовый Z267

(включает сиденье, спинку, чехол и грудной ремень)



| | | | Z210 малый | Z220 средний | Z230 большой | | | | |
|---------------------------|---|-------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Базовые компоненты | Сиденье для ванны | | Z211 | <input type="checkbox"/> | Z221 | <input type="checkbox"/> | Z231 | <input type="checkbox"/> | |
| | Цвет | ВЫБОР | Синий | <input type="checkbox"/> | СИННИЙ | <input type="checkbox"/> | СИННИЙ | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Розовый | <input type="checkbox"/> | РОЗОВЫЙ | <input type="checkbox"/> | РОЗОВЫЙ | <input type="checkbox"/> | |
| Дополнительные аксессуары | Грудной ремень | ВЫБОР | С латеральным позиционированием | Z212 | <input type="checkbox"/> | Z222 | <input type="checkbox"/> | Z232 | <input type="checkbox"/> |
| | | | Без латерального позиционирования | Z213 | <input type="checkbox"/> | Z223 | <input type="checkbox"/> | Z233 | <input type="checkbox"/> |
| | Головные блоки | | Z214 | <input type="checkbox"/> | Z214 | <input type="checkbox"/> | Z234 | <input type="checkbox"/> | |
| | Ремни для ног | | Z215 | <input type="checkbox"/> | Z225 | <input type="checkbox"/> | Z235 | <input type="checkbox"/> | |
| | Опора для икр (Можно заказать только перед покупкой. Нельзя добавить позже) | | Z216 | <input type="checkbox"/> | Z226 | <input type="checkbox"/> | Z236 | <input type="checkbox"/> | |
| | Подставка для ванны | | Z217 | <input type="checkbox"/> | Z217 | <input type="checkbox"/> | Z217 | <input type="checkbox"/> | |
| | Подставка для душа | | Z218 | <input type="checkbox"/> | Z218 | <input type="checkbox"/> | Z218 | <input type="checkbox"/> | |
| | Устройство перемещения в ванну | ВЫБОР | С поворотом вправо | Z227 | <input type="checkbox"/> | Z227 | <input type="checkbox"/> | Z227 | <input type="checkbox"/> |
| | | | С поворотом влево | Z228 | <input type="checkbox"/> | Z228 | <input type="checkbox"/> | Z228 | <input type="checkbox"/> |
| | Дополнительные головные блоки | | Z214 | <input type="checkbox"/> | Z214 | <input type="checkbox"/> | Z214 | <input type="checkbox"/> | |
| | Дополнительный чехол | | Z219 | <input type="checkbox"/> | Z229 | <input type="checkbox"/> | Z239 | <input type="checkbox"/> | |
| | Дополнительный грудной ремень | ВЫБОР | С латеральным позиционированием | Z212 | <input type="checkbox"/> | Z222 | <input type="checkbox"/> | Z232 | <input type="checkbox"/> |
| | | | Без латерального позиционирования | Z213 | <input type="checkbox"/> | Z223 | <input type="checkbox"/> | Z233 | <input type="checkbox"/> |
| | Итого: | | Z210 | <input type="checkbox"/> | Z220 | <input type="checkbox"/> | Z230 | <input type="checkbox"/> | |